

./'GC./



Photoshooting 1 - 4: CDT D. Ibraimi, Switzerland
Photoshooting 5 - 6: Byrnes Dental Laboratory, UK

initial IQ

ジーシー イニシャルIQ ラスターペースト ガムシェード

イニシャルIQ ラスターペースト ガムシェードは、歯頸部から歯肉にかけて、より天然歯に近づけるために開発された三次元セラミックステインです。インプラントの上部構造や軟組織領域へのセラミックステインにより審美的なアプローチの選択肢が広がりました。熱膨張係数(CTE)に制限されることなく、イニシャルシリーズのすべての製品と互換性があります。



ラスターペーストは、すべてのイニシャルシリーズに立体的な色の深みや透明感、繊細な色調表現ができるペースト状のステインです。独自のリキッドセラミックを使った操作性は狙った色調を容易に再現し、ごく短時間で極めて審美的なセラミック修復が可能になります。

イニシャルシリーズ全品に対応

イニシャルMC(メタルセラミックス)、イニシャルZr-FS(フルセラミックス)をはじめ、イニシャルシリーズ全品に使用可能なペースト状のガムシェードを追加しました。

適度なチキントロピー性

精密な作業にを実現できるチキントロピー性があり、思い通りのガム付き補綴装置の製作が行えます。

微調整が容易なパウダー状のモディファイヤー

ステインモディファイヤー(LP-M1~M4)をベースカラーに直接加えて混和・使用します。目的の色調が得られるまで目視にて微量の調節ができますので、より精密な作業が行えます。



常に安定した操作性を確保

作業中のちよう度を一定に保つために、ディルーティングリキッドおよびリフレッシュリキッドで調整可能。乾燥による操作性の変化がありません。



歯肉エリアにモディファイヤー(FM5)を塗布。



焼成後。



歯肉はZr-FSガムシェードGM-23、歯冠はフレームモディファイヤーを使用。歯肉と歯冠は、同時に焼成できます。



一次焼成後。



歯肉領域はG-24、歯間はG-36を使って色調を強めます。



生命感あふれる天然歯のような審美性が得られます。

【ベースカラー】



G-23
ベースライト



G-24
ベースダーク



G-34
インテンシブバイオレット



G-35
インテンシブクリーム



G-36
インテンシブレッド

【エフェクトカラー】



LP-M1

モディファイヤー ホワイト



LP-M2

モディファイヤー レッド



LP-M3

モディファイヤー ブルー



LP-M4

モディファイヤー ブラウン



【包装・希望医院価格】イニシャルIQラスターペースト ガムシェードセット
ガムシェードG-23、G-24、G-34、G-35、G-36各4g1本、ステインモディファイヤーLP-M1、LP-M2、LP-M3、LP-M4各3g1個、ディルーティングリキッド8mL1本、リフレッシュリキッド8mL1本、ブラシ00、ブラシ2 各1本、ミキシングディッシュ、ミキシングディッシュ用プラスチックカバー各1個、IQラスターペーストテクニカルマニュアル1冊、IQラスターペーストカラーチャート1枚

管理医療機器 222AFBZX00138000

※色調は印刷のため、現品と若干異なることがあります。

※掲載の価格は、2016年2月現在のものです。

※価格は希望医院価格です(価格には消費税は含まれておりません)。

ご使用に際しては、必ず製品の添付文書をお読みください。

発売元 **株式会社 ジーシー** / 製造販売元 **株式会社 ジーシー**
東京都文京区本郷3丁目2番14号

DIC (デンタルインフォメーションセンター)

お客様窓口 ☎ **0120-416480**

受付時間9:00a.m.~5:00p.m. (土曜日、日曜日、祭日を除く)

<http://www.gcdental.co.jp>

支店

●東京 (03)3813-5751 ●大阪 (06)4790-7333

営業所

●北海道 (011) 729-2130 ●名古屋 (052) 757-5722

●東北 (022) 283-1751 ●九州 (092) 441-1286